

MANUAL

Erection System[®]

Návod k použití

Důležité upozornění:

Před použitím erekční pomůcky si přečtěte tento návod k použití. Návod k použití si uschovejte. Shlédněte animaci na přiloženém DVD.

Návod k použití

Když je penis ztopořený, říká se tomu erekce. Když má muž problém s dosažením erekce, říká se tomu erektilní porucha. **MANUAL Erection System**[®] je přístroj, který Vám pomůže ke ztopoření penisu. Proto je **MANUAL Erection System**[®] v této brožuře nazýván také erektilní pomůcka.

Jaké jsou příčiny poruchy erekce?

Existuje mnoho různých příčin, které mohou vést k poruchám erekce. Mezi nejčastější příčiny patří cukrovka, onemocnění štítné žlázy, nemoci jater nebo ledvin, léčba vysokého krevního tlaku, srdečních a oběhových chorob. Operace na prostatě vedou většinou také k poruchám erekce. Také deprese nebo vyčerpání mohou vést k poruchám erekce. Někdy jsou poruchy erekce také vedlejším účinkem léků, například léků proti vysokému krevnímu tlaku. Kouření a pití příliš velkého množství alkoholu je také možnou příčinou.

Co je součástí **MANUAL Erection System**[®]:

- hlavice pumpy
- průhledný válec
- velké šedé pouzdro
- malé šedé pouzdro
- šedý kužel
- 4 erekční kroužky různých velikostí
- tuba lubrikantu
- návod k použití s DVD
- taška

Jak se připravím na použití?

Všechny obrázky k výrobku naleznete na konci tohoto letáku.

Připravte si všechny součásti. (Obrázek 1)

- Zatlačte hlavici pumpy do většího otvoru válce, jak je znázorněno na obrázku 2.
- Nasuňte velké pouzdro na druhou stranu válce. (Obrázek 3)
- Zastrčte malé pouzdro do velkého pouzdra.
- Zastrčte kužel do malého pouzdra. (Obrázek 4)
- Naneste trochu lubrikantu na špičku kuželu. (Obrázek 5)

- Položte na špičku kuželu jako první největší erekční kroužek (20 mm). Nasuňte erekční kroužek přes kužel na malé pouzdro. Nyní kužel odstraňte. (Obrázek 6)
- Erekční pomůcka je nyní připravena k použití.

Jak mám používat erekční pomůcku?

- Odstraňte pubické ochlupení přímo z penisu a z kořene penisu.
- Přístroj musí pevně sedět na kůži.
- Naneste trochu lubrikantu na okraj pouzdra. (Obrázek 7)
- Zavedte penis skrz objímku do válce. (Obrázek 8)
- Přitiskněte přístroj pevně k tělu.
- Vytáhněte modrou páčku na hlavici pumpy. Tím nasajete vzduch z válce. (Obrázek 8)

Vidíte ve válci dobrou erekci?

- Pak nasuňte erekční kroužek z pouzdra na ztopořený penis.
- Nasuňte erekční kroužek rychle a co nejdále ke kořenu penisu. (Obrázek 9)
- Modré tlačítko „air“ na hlavici pumpy je označeno tečkou pouze k napuštění vzduchu. (Obrázek 10)
- Po stisknutí tlačítka „air“ je do válce přiváděn vzduch.
- Tím se dostane do válce vzduch a můžete erekční pomůcku snadno uvolnit z těla.
- Erekční kroužek na penisu zajišťuje, aby penis zůstal ztopořený. (Obrázek 11)
- Nyní můžete mít pohlavní styk.

Důležité upozornění: Nenechávejte erekční kroužek na penisu déle než 30 minut. Neusněte s erekčním kroužkem na penisu!

Po pohlavním styku:

- Odtáhněte erekční kroužek krátce od sebe za chlopně.
- Vyčkejte, až krev z penisu odteče zpět do těla.
- Pak stáhněte erekční kroužek z penisu. Když používáte erekční pomůcku, nedochází při orgasmu k viditelné ejakulaci. (Obrázek 12)
- Erekční kroužek zadrží sperma v penisu.
- Když erekční kroužek odstraníte, vyteče sperma z penisu.
- Přechodné zadržení spermatu v penisu není škodlivé.
- Po použití erekční pomůcky vyčistěte, jak je popsáno v odstavci „Jak mám vyčistit erekční pomůcku?“.
- Díly vysušte.
- Všechny díly opět uložte do tašky.

Jak funguje erekční pomůcka?

Hlavice pumpy odsává vzduch okolo penisu z válce. Tím vzniká podtlak (vakuum). V důsledku toho se cévy v penisu naplní krví a penis se ztopoří. Protože je válec průhledný, vidíte, zda je erekce dostatečně pevná. K dosažení erekce většinou stačí, když se pumpuje pár minut.

Tipy pro použití

Použití této erekční pomůcky je jednoduché. Přesto je lepší erekční pomůcku zpočátku vyzkoušet sám a v klidu. Pak můžete erekční pomůcku ukázat své partnerce nebo svému partnerovi. Když oba víte, jak erekční pomůcku správně

použít, můžete si opět užít sex. Také ve vyšším věku, při nemoci nebo při tělesném omezení.

Jak zvolím správný erekční kroužek?

Aby Vaše erekce vydržela pokud možno dlouho, musíte zvolit správný erekční kroužek. Když je erekční kroužek příliš velký, nezůstane penis dlouho ztopořený. Když je erekční kroužek příliš úzký, mohl by způsobit bolest. Když máte bolesti, erekční kroužek sejměte a zkuste to s větším erekčním kroužkem. Když používáte erekční pomůcku poprvé, nejlepší je začít s největším erekčním kroužkem. Pokud je erekční kroužek příliš velký, zkuste menší, dokud nenajdete správnou velikost. K erekční pomůcce patří 2 **pouzdra**. Menší je poněkud užší, větší je poněkud širší. Pokud je menší pouzdro příliš úzké, použijte to větší. Obě pouzdra se hodí **pro všechny erekční kroužky**. Je tedy jedno, který erekční kroužek použijete. Pokud jsou obě pouzdra příliš úzká, můžete erekční kroužek upnout přímo na válec. K erekční pomůcce navíc patří **kužel**. Pomáhá Vám snadněji upnout erekční kroužek na pouzdra. Můžete však erekční kroužek nasunout na pouzdra i ručně bez použití kuželu.

Používejte pouze dodané erekční kroužky. Čas od času je potřeba použít nové erekční kroužky. Můžete si je doobjednat na adrese info@falconik.cz.

Tuto erekční pomůcku rozhodně nepoužívejte, pokud jste pili alkohol nebo užili drogy. Erekční pomůcku nepoužívejte, pokud již nefunguje správně. Erekční pomůcku také nepoužívejte, pokud je viditelně poškozena. V obou případech laskavě zašlete erekční pomůcku přímo výrobci **KESSEL medintim GmbH**.

Opravy v záruční době jsou zdarma. Pokud přístroj již nefunguje nebo je poškozený, protože jste jej nepoužíval správně, musíte opravu vždy zaplatit. Pokud nebydlíte v Německu, obraťte se laskavě na specializovaného prodejce, od nějž jste si erekční pomůcku koupil. Používejte pouze lubrikanty, které lze snadno smýt vodou.

Máte otázky?

Pak zavolejte na toto číslo: +420 513 032 007

Nebo napište e-mail na adresu: info@falconik.cz

Jaké nežádoucí účinky může mít erekční pomůcka?

Trpíte srdečním onemocněním nebo onemocněním oběhové soustavy?

Pak si pohovořte se svým lékařem nebo lékařkou, než erekční pomůcku poprvé použijete.

Jsou možné následující nežádoucí účinky:

Může se Vám udělat krevní podlitina v místě nasazení nebo na špičce penisu. Někdy také dojde k mírnému poškození tkáně, pokud penis již nebyl dlouho ztopořen. To však není nebezpečné.

Kdy bych neměl erekční pomůcku používat?

Erekční pomůcku nepoužívejte, pokud máte některé z těchto onemocnění:

- onemocnění červených krvinek, například srpkovitou anemii
- rakovinu krve (leukemii)

- nádory kostní dřeně
 - onemocnění, která mají vliv na srážlivost krve
 - onemocnění, která vedou ke krvácení nebo k prodloužené erekci
 - jiná onemocnění, při nichž není sex prospěšný
- Pokud si nejste jist, zda můžete erekční pomůcku používat bez problémů pro své zdraví, zeptejte se svého lékaře nebo lékařky.

Jak mám čistit erekční pomůcku?

Před čištěním sejměte z erekční pomůcky hlavici pumpy. Všechny ostatní díly lze mýt teplou vodou a jemně působícím mýdlem. Nepoužívejte žádné silné čisticí prostředky.

Jak mám zlikvidovat erekční pomůcku?

Všechny díly můžete odložit do komunálního odpadu.

Záruka

Téměř pro všechny díly platí záruka 2 roky, jak předepisuje zákon. Na spotřební materiál, například na erekční kroužky, se nevztahuje žádná záruka. Musíte je čas od času vyměnit. Záruka neplatí, pokud erekční pomůcku poškodíte nebo ji používáte nesprávně. Hlavice pumpy je uvnitř zapečetěna a smí ji otevřít pouze výrobce nebo autorizovaný partnerský servis. Měl byste podle možnosti erekční pomůcku zaslat každé 3 roky na technické přezkoušení.

Z jakého materiálu jsou jednotlivé díly?

- Kužel plast (ABS)
- Malé a velké pouzdro: plast (ABS)
- Válec: plast (polykarbonát)
- Erekční kroužky: biokompatibilní termoplasticky elastomer (TPE)
- Taška: NylonR

Můžete si doobjednat všechny díly a lubrikant. Aktuální seznam pro doobjednávání získáte u distributora pro ČR na adrese distributora pro ČR (viz.níže), info@falconik.cz, webových stránkách www.falconik.cz.

Datum poslední revize textu:
27. 7. 2017

Kontaktní informace, zastoupení pro ČR a SR:

Falconik s.r.o.

andrologická divize Andronik

Břenkova 15

613 00 Brno


Česká Republika

Tel.: +420 734 307 844


Mail: info@andronik.cz

www.andronik.cz


1

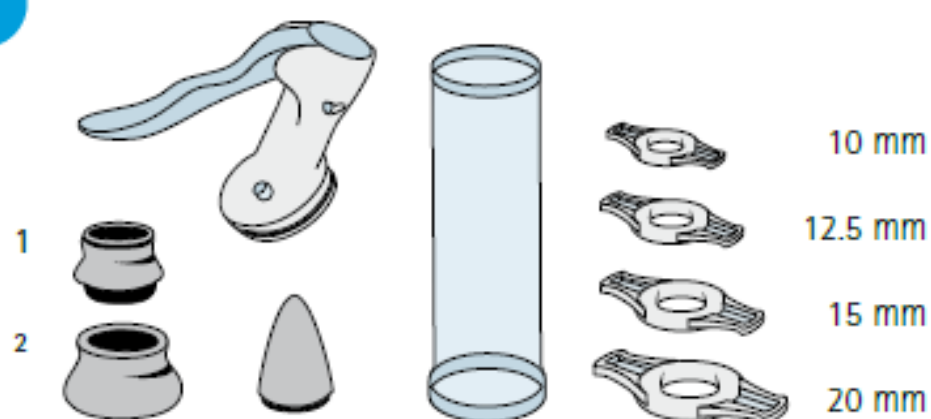


2

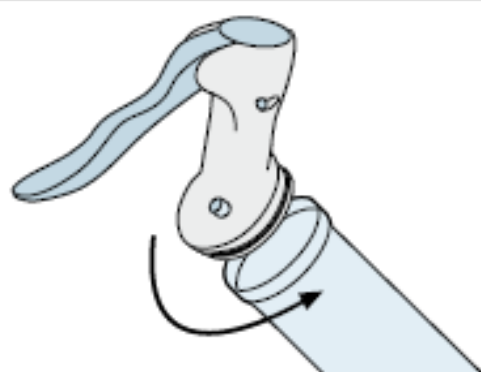


3







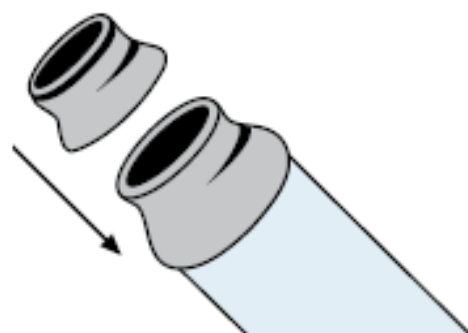


4

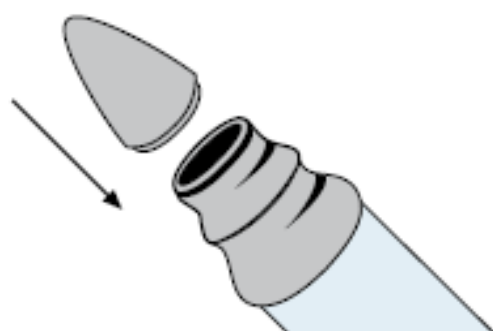

5

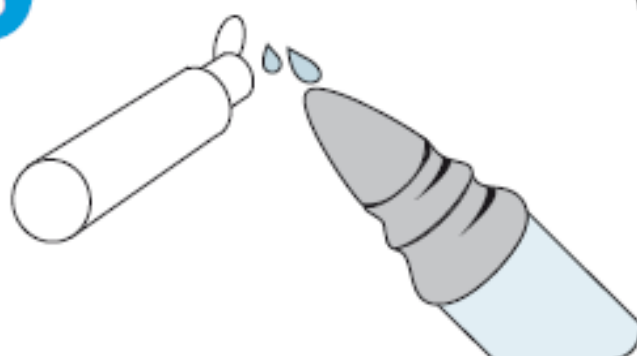

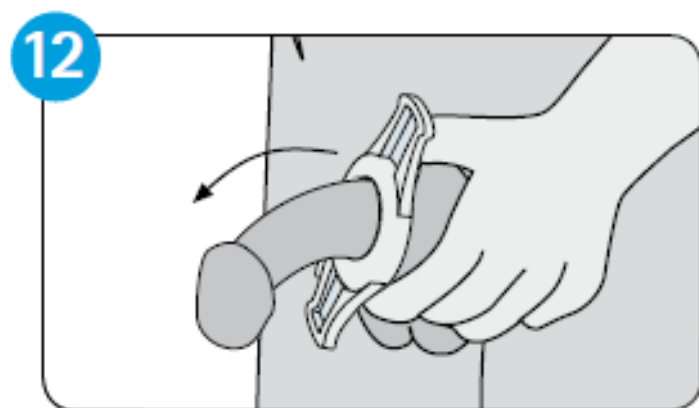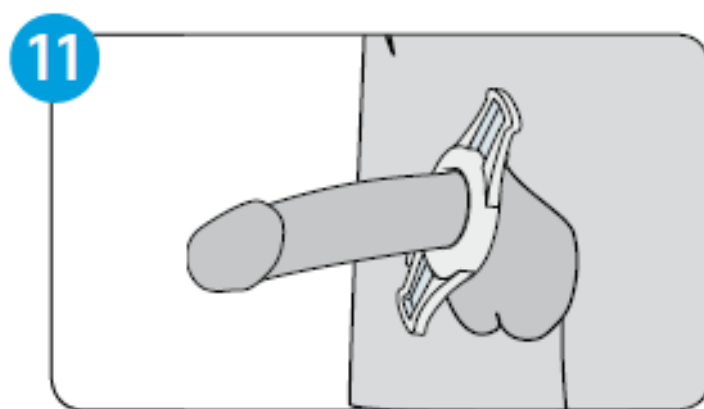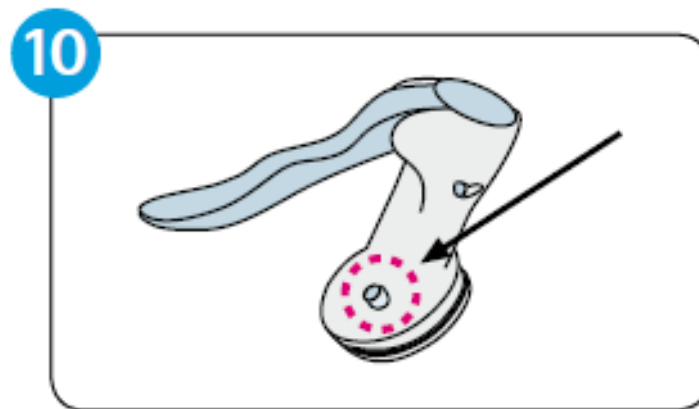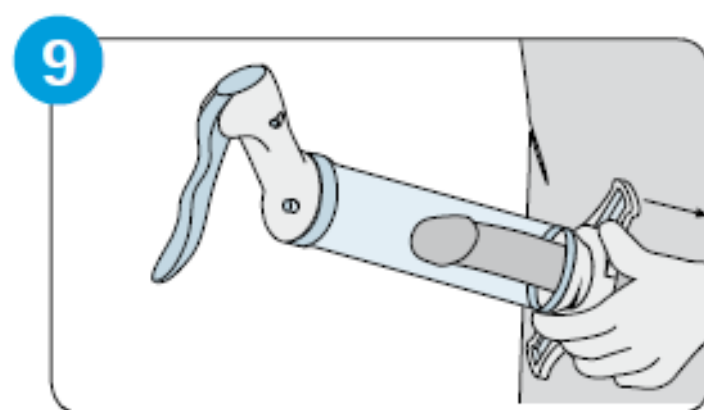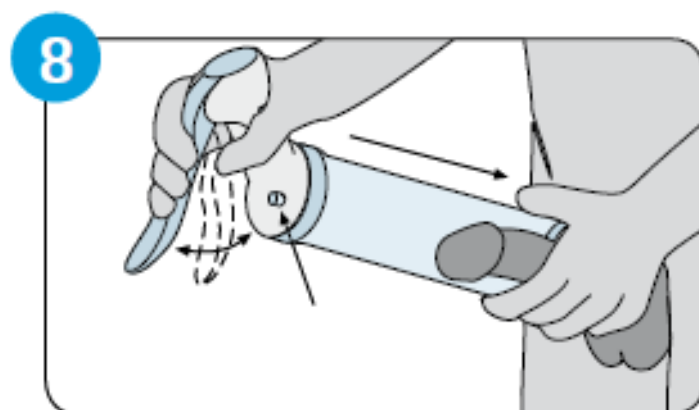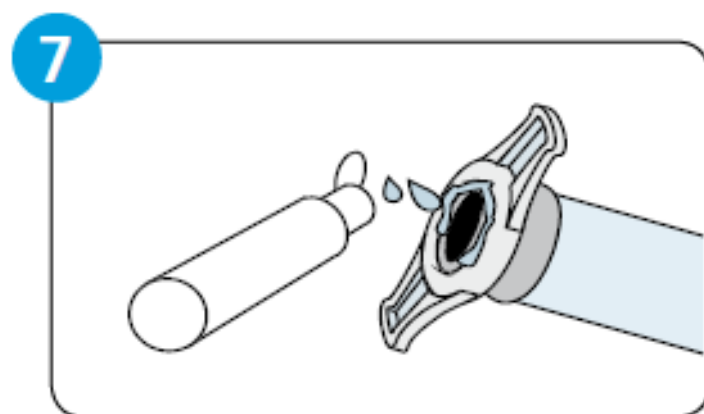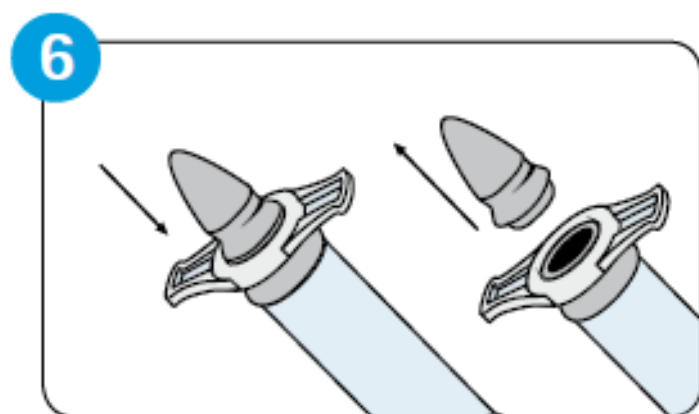





Nepoužívejte, pokud je obal poškozen



Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte
příložené pokyny



Nepoužívejte v případě srpkovité anémie nebo
nádorů kostní dřeně



Uchovávejte přístroj na suchém místě



Křehké



KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
D-64546 Morfelden-Walldorf / Germany
Tel. +49 (6105) 20 37 20
service@medintim.de
www.medintim.de



Medizinprodukt / Medical
Device / Zdravotnický
prostředek
FDA registered device
Made in Germany