

REHABI^{PVT®}

Penile Vacuum-Trainer

Příčiny erektilní dysfunkce a impotence

Metabolická onemocnění
Kardiovaskulární onemocnění
Neurologické poruchy
Psychické poruchy
Urogenitální malformace a nemoci
Chirurgické zákroky v břišní, pánevní a urogenitální oblasti
Změny kavernózního tělesa – např. Peyronieho choroba
Vedlejší účinky léků

Indikace

Pooperační trénink kavernózních těles po radikální prostatektomii a po chirurgických zákrocích v malé pánvi pro zlepšení erektilní funkce a snížení potenciální inkontinence po operaci.
Rehabilitace prokrvení kavernózních těles u pacientů s cévními onemocněními, DM, KV chorobou.

Trénink kavernózních těles u mírné Peyronieho choroby (penilní fibromatózy) snižuje míru zakřivení. Přístroj by měl být používán po delší časové období.

Informace o produktu

REHABI PVT® je určen jako zdravotnický prostředek pro pomoc při rehabilitaci a zachování erektilních funkcí po prostatektomii a po chirurgických zákrocích v malé pánvi. REHABI PVT® vytváří ve válci kolem penisu podtlak. To způsobí, že kavernózní tělesa se naplní krví, což vede k vyztužení penisu. Tyto erekce mají zásadní význam pro obnovu a zachování erektilní funkce. Tepenní krev, 1x – 3x bohatší na kyslík, se vlévá do tkáně kavernózních těles. Rehabilitace tak zlepšuje přísun kyslíku do cév, nutí hladké svaly kavernózních těles k činnosti. Tím se zvětší délka penisu, obvod penisu a působí proti ztrátě erektilní funkce.

REHABI PVT® se skládá z těchto částí:

- 1 válec, transparentní
- 1 pumpovací hlavice, manuální
- adapter pro tělo
- skladovací obal
- Lubricant Sylk (50ml)
- Návod k použití

Okomentoval(a): [J2]: Kavernózních těles

Okomentoval(a): [J3]: Pro

Okomentoval(a): [J4]: Kavernózních těles

Okomentoval(a): [J5]: U mírné Peyronieho choroby

Okomentoval(a): [J6]: To asi rozděl:
REHABI PVT

Okomentoval(a): [J7]: To asi rozděl:
REHABI PVT

Okomentoval(a): [J8]: Kavernózní tělesa

Okomentoval(a): [J9]: vyztužení

Okomentoval(a): [J10]: stejné jako předchozí, ostatní už nechávám bez komentáře, jen označím

Okomentoval(a): [J11]: To asi rozděl:
REHABI PVT

Návod k použití

Trénink **kavernózních těles** může začít okamžitě po úspěšném **zhojení** ran a v okamžiku zahájení rehabilitační fáze. I když je použití přístroje zahájeno až v mnohem pozdější době, je trénink **kavernózních těles** stále účinný a užitečný při léčbě erektilní dysfunkce.

Trénink **kavernózních těles** může být prováděn několikrát denně po dobu několika minut.

Neexistuje žádné riziko kvůli silnému negativnímu tlaku, neboť přístroj vytváří omezený – limitovaný podtlak. Na hlavě pumpy je zelené tlačítko „Air“. Po stisku tohoto tlačítka můžete válec zavzdušnit a podtlak zmizí.

Okomentoval(a): [J12]:


Okomentoval(a): [J13]: zahojení

Okomentoval(a): [J14]:


Okomentoval(a): [J15]:

- 1) Připravte všechny části pomůcky **REHABI PVT®**

Okomentoval(a): [J16]: To asi rozděl:
REHABI PVT

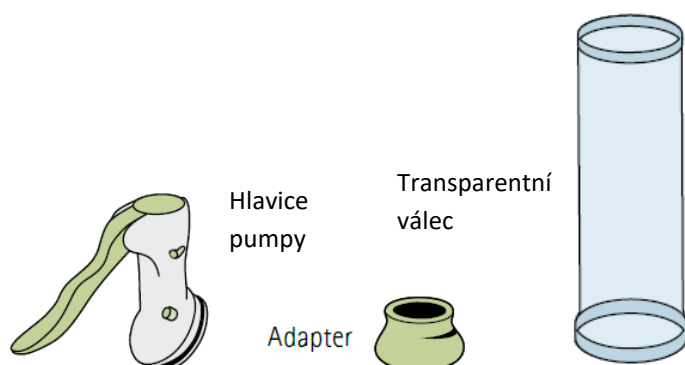

- 2) Umístěte hlavici s pumpou na transparentní válec
(Strana válce bez těsnicího kroužku.)

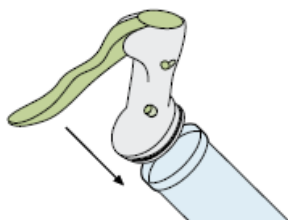


- 3) Umístěte adaptér na opačnou, otevřenou stranu válce (s těsnicím kroužkem).



- 4) Pro dobrou funkci adaptéru jej zvlhčete na otevřené straně válce, tak aby těsně přiléhal. Odstraňte na ohanbí veškeré ochlupení.



- 5) Pro použití přístroje, vložte penis do otevřeného konce válce. Podtlak uvnitř válce se vytváří prostřednictvím páčky pumpy. Po asi 20 – 25 stlačeních páčky se objeví uvnitř válce znatelný pokles tlaku. K tomuto účelu musí být válec pevně přitisknutý k tělu. Podtlak zvyšuje tok krve do kavernózních těles (corpus cavernosum) a žaludu. To vytváří umělou erekci, která musí být pod tlakem udržována po dobu několika minut. Během této doby zůstává penis ve válci.

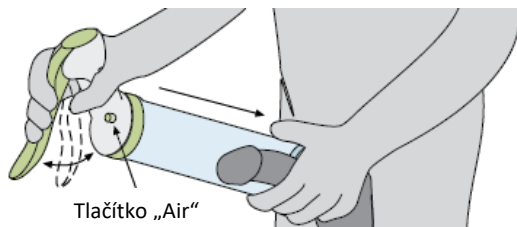

- 6) Když chcete ukončit trénink kavernózních těles, je třeba uvolnit vstup vzduchu do válce stlačením tlačítka „Air“ (zavzdušňovací ventil). Podtlak i erekce zmizí.

Trénink kavernózních těles se může provádět několikrát denně jako součást rehabilitace pro zlepšení arteriálního prokrvení.

Trénink erektilní tkáně pomocí REHABI PVT® může být prováděn během několika měsíců i opakovaně.

Trénink erektilní tkáně se provádí pouze z rehabilitačních důvodů. REHABI PVT® může být rozšířena na ruční pumpu (Manual® Erection System) s penilními erekčními kroužky (pro pohlavní styk). Vyžádejte si naši nabídku na „REHABI® rozšíření na MES“.

Okomentoval(a): [J17]:

Okomentoval(a): [J18]: Během

Okomentoval(a): [J19]:

Okomentoval(a): [J20]: To asi rozděl:
REHABI PVT

Okomentoval(a): [J21]: To asi rozděl:
REHABI PVT

Okomentoval(a): [J22]: To asi rozděl:
REHABI PVT

Čištění

REHABI PVT® lze snadno omýt teplou vodou a mýdlem. K čištění je třeba sejmout hlavu pumpy z válce. Vyčistěte vnější části hlavy pumpy vlhkým hadříkem a mýdlem. Nepoužívejte žádné silné (agresivní) čisticí prostředky. K uložení všech dílů je určena přiložená brašna.

Okomentoval(a): [J23]: To asi rozděl:
REHABI PVT

Okomentoval(a): [J24]: omýt

Záruka:

Záruka 2 roky se vztahuje na hlavu pumpy. Záruka neplatí v případě nesprávného použití, např. pádem přístroje. V případě reklamaci uvádějte prosím sériové číslo (je uvedeno na hlavě pumpy).

Materiál:

- Hlava pumpy: polykarbonát
- Válec: polykarbonát
- Adapter: TPE

Rozměry

REHABI PVT® – kompletní pumpa 200 x 50 mm

Okomentoval(a): [J25]: To asi rozděl:
REHABI PVT

Kontraindikace

Trénink erektilní tkáně by neměl být prováděn u osob s onemocněním srpkovitá anémie, leukémie, nádory kostní dřevě nebo s onemocněním souvisejícím se změnami srážlivosti krve nebo těmi, které vedou ke krvácivosti a prodloužené erekci.

Kontaktní informace, zastoupení pro ČR a SR:

Falconik s.r.o.
Břenkova 15, Brno
613 00
Česká Republika
Tel. 734 307 844
Mail: info@andronik.cz
www.andronik.cz
www.poruchyerekce.info